

Leiderdorp, 29 juni 2001

Productinformatie-blad InstruPlus

Product: InstruPlus **Producent:** Laboratorium Dr. Deppe
Kempen (Duitsland)

Classificering: Het product InstruPlus is naar richtlijn 93/42/EWG van 14 juni 1993, Aankhangsel IX regel 15 als medisch product van klasse IIa geclassificeerd.

Toepassing: Desinfectie-middel op concentraat-basis bedoeld voor medische instrumenten, met name voor flexibele endoscopen en accessoires voor toepassing in de endodesinfectoren of manueel gebruik.

Gebruik: Volgens de DGHM richtlijnen (1994) is goedkeuring afgegeven voor de volgende desinfectie concentraties:

A. Manuele toepassing

1% / 60 minuten

2% / 30 minuten

3% / 15 minuten

B. Machinale toepassing

2% / 10 minuten

Temperatuur: Gebruiksoptimalisatie is vastgelegd met een temperatuur van 20° C – 40° C met een ideaal temperatuursgebied van 30° C – 35° C voor een optimale werking.

Bestanddelen: 100 gram bevat: 5,72 gram Formacetaal
3,50 gram Ethandiaal
2,80 gram Formaldehyde
1,90 gram Glutaardialdehyde
3,50 gram Quaternaire
Ammoniumverbindingen

Formacetaal en formaldehyde komen niet vrij doordat zij zich aan elkaar binden (TÜV, 1991)

UBA-nummer: 11290004

CE-Certificaat: CE-0197

Goedkeuringen:

1. Prof Dr. Med. R. Schubert, Frankfurt 1994
2. Prof. Dr. Med. B. Wille, Gießen 1994
3. Prof. Dr. Med. G. Frösner, München 1986 (HBV/HIV)
4. Prof. Dr. Med. B. Wille, Gießen 1992 (TBC – M. Terrae)
5. Prof. Dr. Med. B. Wille, Gießen 1985

De complete testresultaten kunnen op verzoek worden toegezonden.

Veiligheidsvoorschriften (kenteken codes):

Kenteken-codes betreffen de in acht te nemen veiligheidsvoorschriften volgens het EG-veiligheidsblad.

R-kenteken: R40-R43-R36/37/38

S-kenteken: S2-S26-S37/39-S51

Oplossing:

InstruPlus heeft een standtijd van 14 dagen met het gebruik maken van drink-water kwaliteit. Indien de gebruiksooplossing een 1% of 2% concentratie bevat, in de omgang als niet-gevaarlijke stof volgens de Europese Richtlijnen van gevaarlijke arbeidsstoffen.

Concentraat:

Voor machinale toepassingen kan het concentraat gebruikt worden.

2% / 10 minuten

Een 2%-gebruiksooplossing InstruPlus bevat 0,04% Glutardehyde.

Wij adviseren als voorreinigingsproduct InstruZym (Laboratorium Dr. Deppe) te gebruiken.

Materiaalverdraagzaamheid:

InstruPlus heeft een goede materiaalverdraagzaamheid, waarbij talrijke referenties van endoscopie-firma's op aanvraag toegestuurd kunnen worden.

Dermatologie:

InstruPlus als concentraat kan bij langdurig, veelvoudig contact met de huid, slijmvliesen of ademhalingsorganen irriterend werken. Derhalve de container gesloten bewaren. De hoogverdunde oplossing (1% - 2%) is niet als irriterend of schadelijk voor de gezondheid geregistreerd of gekentekend (zie veiligheidsblad). Luchtverontreiniging die schadelijk voor de gezondheid zouden kunnen, zijn niet vastgesteld. Bij personen met een bijzondere dispositie voor aldehyde-onverdraagzaamheid kan een vereenvoudigde overgevoeligheid optreden.

Endotechniek
Vezelbaan 7
2352 DM Leiderdorp

Tel: 071-523 8013