



Zo gebruik je **INDERMIL**[®] **flexifuze**^{TM*} in 3 simpele stappen

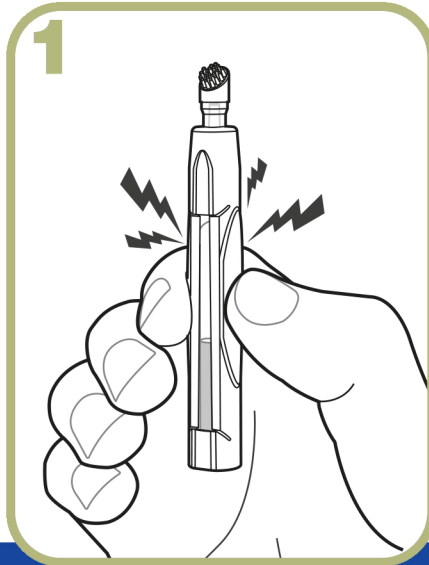


Stap 1:

Reinig eerst de wond volgens protocol. Houd de applicator in één hand, met het borsteltje naar boven gericht, weg van de gebruiker en de patiënt om onbedoeld contact te vermijden. Druk de applicator tussen wijsvinger en duim op de verhoogde kussens om de glazen ampul aan de binnenkant te breken.

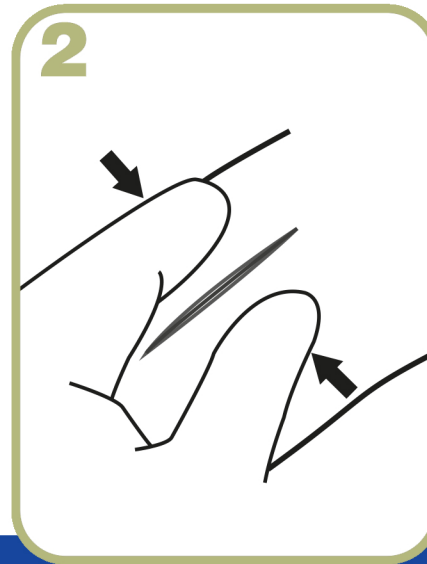

Stap 2

Druk de wondranden dicht naar elkaar toe.

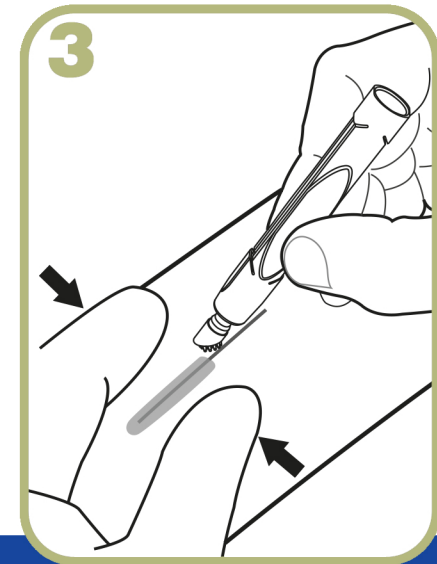

Stap 3

Knij voorzichtig met duim en wijsvinger in het buisje totdat de lijm op het borsteltje verschijnt. Breng een dun laagje lijm aan over de lengte van de wond. Houd de wond gedurende 60 seconden gesloten om de binding te voltooien.

De huidlijm biedt een langere gemiddelde lineaire dekking (tot 60 cm).


*Een product van Medtronic, ontwikkeld door Connexicon

Zo gebruik je **INDERMIL®** **flexifuze™*** rondom het oog




Stap 1

Reinig de wond grondig volgens protocol. Zorg ervoor dat de wondranden gemakkelijk benaderd kunnen worden. Positioneer de patiënt zo dat eventuele lijmresten bij het oog vandaan blijven. Zorg dat het oog gesloten is en dek het af met een gaasje.

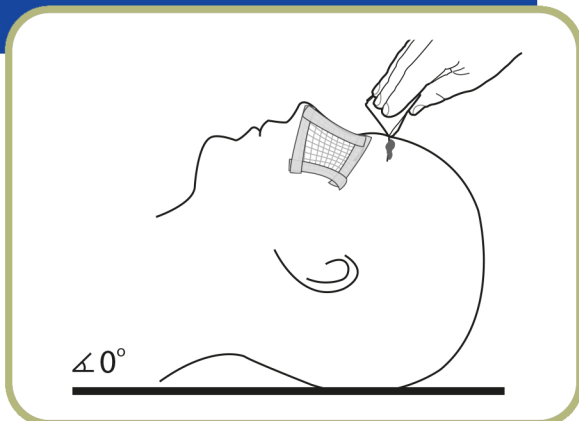


Stap 2

Plaats vaseline rondom het oog. De laag vaseline fungeert als een mechanische barrière, die effectief kan zijn bij het voorkomen van onbedoelde vloeï van lijm in het oog.

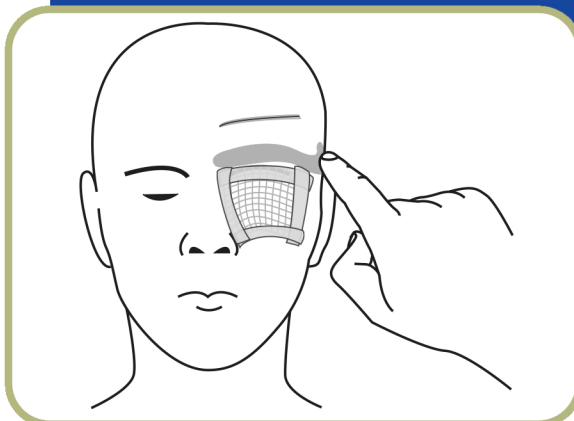


Stap 3

Houd de applicator in één hand, met het borsteltje naar boven gericht, weg van de gebruiker en de patiënt om onbedoeld contact te vermijden. Druk de applicator tussen wijsvinger en duim op de verhoogde kussens om de glazen ampul aan de binnenkant te breken.

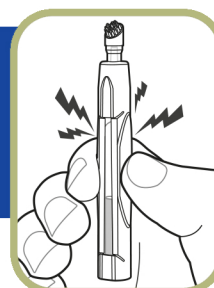


Stap 4

Druk de wondranden dicht naar elkaar toe.

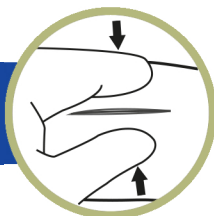

Stap 5

Knijp voorzichtig met duim en wijsvinger in het buisje totdat de lijm op het borsteltje verschijnt. Breng een dunne laagje lijm dun aan over de lengte van de wond. Houd de wond gedurende 60 seconden gesloten om de binding te voltooien.

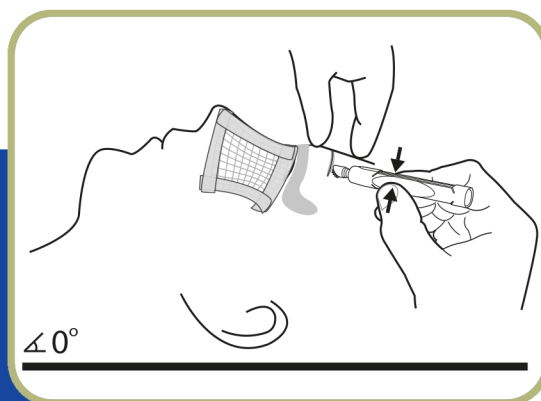

De huidlijm biedt een langere gemiddelde lineaire dekking (tot 60 cm).

Wat te doen als de **INDERMIL® flexifuze™** huidlijm in het oog terecht komt.

Indermil® flexifuze™ mag niet op het oogoppervlak worden aangebracht. Als het oog dichtgebonden is met huidlijm, laat de wimpers loskomen met warm water door ze af te dekken met een nat watje. Indermil® flexifuze™ hecht zich aan het oogewit en zal traanogen veroorzaken, wat zal bijdragen bij het loslaten van de lijm. Houd het oog bedekt tot de onthechting is voltooid, gewoonlijk binnen 1 tot 3 dagen. Forceer het oog niet open. Als er lijmresten achterblijven, neem contact op met een oogarts.

*Een product van Medtronic, ontwikkeld door Connexicon