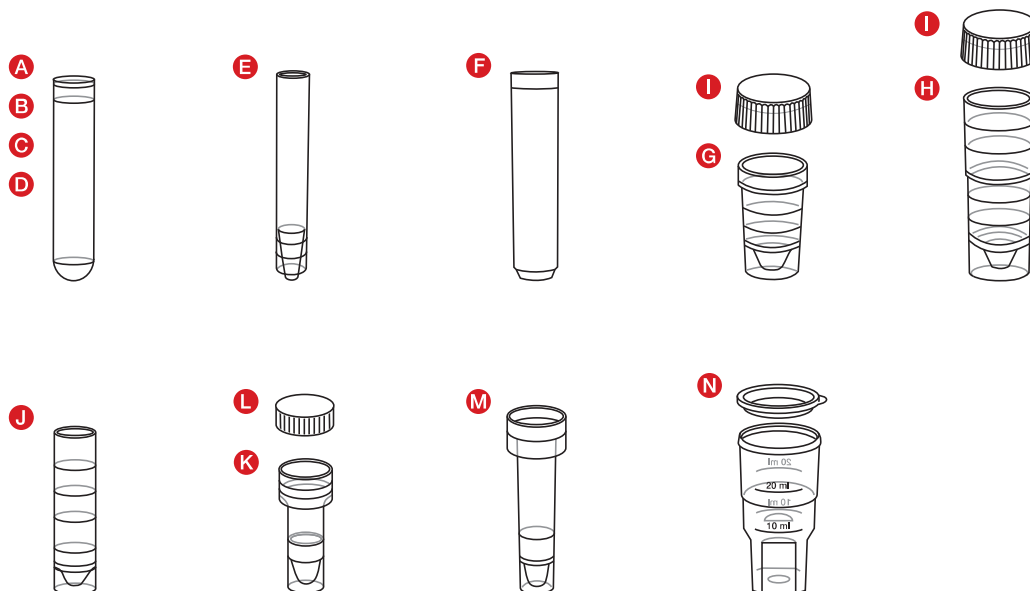


**Gebruik**

De buisjes voor analysesystemen worden gebruikt om monstermateriaal (bijv. serum, plasma of controleoplossingen) op te vangen voor latere analyse in overeenkomstige analysesystemen (zie onderstaande tabel). Het monstermateriaal in de buisjes voor analysesystemen kan gebruikt worden voor automatische of handmatige monsterverwerking. De specificaties van de fabrikanten van de apparatuur moeten in acht worden genomen. De producten zijn bestemd voor gebruik in een professionele omgeving en door gespecialiseerd medisch personeel en laboratoriumpersoneel.

**Productbeschrijving**

De buisjes voor analysesystemen worden in verschillende varianten aangeboden. De versies verschillen in opvangvolume, afmetingen, vorm van de bodem en diverse sluitingsmogelijkheden. Bovendien zijn er steriele en niet-steriele versies verkrijgbaar.

**Artikeloverzicht****Buisjes voor analysesystemen:**

| Type     | Art.-nr.    | Beschrijving                                                                                                                      |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | 55.1578     | Buisje, 5 ml, 75 x 12 mm, ronde bodem, zeer transparant, geschikt voor doorstroomcytometer FACScan                                |
| <b>B</b> | 55.1579.xxx | Buisje, 5 ml, 75 x 12 mm, ronde bodem, PS, geschikt voor doorstroomcytometers zoals FACSCanto, FACSAria, FACSCalibur, LRS2, FC500 |
| <b>C</b> | 55.478.061  | Buisje, 5 ml, 75 x 12 mm, ronde bodem, geschikt voor Vitek en Vitek 2 van bioMérieux                                              |
| <b>D</b> | 55.526.053  | Buisje, 5 ml, 75 x 12 mm, ronde bodem, PS, geschikt voor Abbott m1000                                                             |
| <b>E</b> | 57.477.500  | Buisje, 4,5 ml, 75 x 12 mm, conische bodem, voor Pharmacia/LKB Gamma Counter en Gamma Counter Cobra van Packard                   |
| <b>F</b> | 68.752      | Ronde cuvette 3,5 ml, hoogte: 51 mm, geschikt voor LKB Analyzer en monstervoorbereiding                                           |
| <b>G</b> | 73.641.xxx  | Monsterbuisje 24 x 14 mm voor Kone-Analyser, 73.641.010 voor AAS                                                                  |
| <b>H</b> | 73.646      | Monsterbuisje 38 x 14 mm voor autoanalyser                                                                                        |
| <b>I</b> | 65.649      | Deksel voor autoanalyzer-monsterbuisjes passend bij 73.641.xxx, 73.646.xxx                                                        |
| <b>J</b> | 73.663      | Monsterbuisje 2 ml voor Boehringer ES300/600                                                                                      |
| <b>K</b> | 73.666      | Monsterbuisje 2 ml, 38 x 17 mm, voor Hitachi autoanalyser                                                                         |
| <b>L</b> | 65.718      | Deksel voor Hitachi-buisje, met art.nr. 73.666                                                                                    |
| <b>M</b> | 73.667      | Monsterbuisje 2 ml voor Abbott AxSYM                                                                                              |
| <b>N</b> | 73.650.500  | Monsterbuisje 60 x 34 mm voor Coulter Counter met bijgevoegd deksel                                                               |

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is.

1. Algemene voorzorgsmaatregelen: Gebruik handschoenen en algemene persoonlijke beschermingsmiddelen ter bescherming tegen mogelijke blootstelling aan potentieel infectieuze monsters en overgedragen pathogenen.
2. Behandel alle biologische monsters en afnamehulpmiddelen volgens de richtlijnen en de procedures van uw instelling.  
Zoek medische hulp in geval van direct contact met biologische monsters, aangezien hierdoor HIV, HCV, HBV of andere besmettelijke ziekten overgebracht kunnen worden. De veiligheidsrichtlijnen en -procedures van uw instelling moeten altijd opgevolgd worden.
3. Controleer elke individuele verpakking vóór gebruik op beschadigingen en gebruik het product niet in geval van beschadigingen.
4. De buisjes voor analysesystemen zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Gooi alle producten weg in containers voor gevaarlijke biologische stoffen.
5. De producten mogen niet meer worden gebruikt na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum. De houdbaarheid van de buisjes voor analysesystemen eindigt op de laatste dag van de aangegeven maand en jaar.

## Bewaring

De producten moeten bij kamertemperatuur bewaard worden.

## Gebruik

Gebruik handschoenen, jas, oogbescherming of andere geschikte beschermende kleding ter bescherming tegen door bloed overgedragen pathogenen of mogelijk infectieus materiaal.

### Buisjes voor analysesystemen

1. Open de zak en pak de buisjes voor analysesystemen.
2. Vul het monstermateriaal in het overeenkomstige buisje voor analysesystemen. Zorg ervoor dat het buisje voor analysesystemen niet boven het nominale volume gevuld wordt.
3. Voor gebruik in apparatuur of in automation volgt u de instructies van de fabrikant van de apparatuur.
4. Sluit de buisjes voor analysesystemen zo nodig af met de juiste dop.

## Verwijdering

1. De algemene hygiënerichtlijnen en de wettelijke bepalingen voor de correcte verwijdering van infectieus materiaal moeten in acht genomen en nageleefd worden.
2. Wegverphandschoenen voorkomen het risico op infectie.
3. Gecontamineerde of gevulde producten moeten verwijderd worden in geschikte containers voor gevaarlijke biologische stoffen, die vervolgens geautoclaveerd en verbrand kunnen worden.
4. Verwijdering dient plaats te vinden in een geschikte verbrandingsoven of door middel van autoclaveren (stoomsterilisatie).

## Informatie over symbolen en markeringen:



Artikelnummer



Lotnummer



EXP



CE-markering



Voor *in-vitro* diagnostiek



Gebruiksaanwijzing opvolgen



Bij gebruik: besmettingsgevaar



Niet blootstellen aan zonlicht



Droog bewaren



Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is



Fabrikant



Land van productie

Daarnaast geldt voor steriele producten het volgende:



Sterilisatie door bestraling



Enkel steriel barrièresysteem



Niet opnieuw steriliseren

Technische wijzigingen onder voorbehoud.

Alle ernstige incidenten met betrekking tot het product worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde nationale instantie.